

**Система Активной Реабилитации
шейного отдела позвоночника
Hercules Neck HN-3000
Инструкция
Характеристики Системы:**

- 1) **Передняя часть** - представляет собой жесткую конструкцию, и имеет эргономичный дизайн для фиксированного и удобного положения головы.
- 2) **Задняя часть** - надувной эластичный воротник растягивает позвонки. Фиксаторы для прикрепления воротника расположены по бокам.
- 3) **Подголовник** - для использования системы в лежачем положении.
- 4) **Колпачок для воздушного насоса** - прост и удобен в обращении, для спуска воздуха достаточно просто потянуть за трубку.
- 5) **Воздушный насос с датчиком** - для быстрого и контролируемого нагнетания воздуха в систему до 7-9 PSI.

При использовании системы необходимо соблюдать следующие правила:

1. Внимательно изучите инструкцию. Наденьте на себя и скрепите липучкой переднюю и заднюю части системы и подключите к вентилю насос. Надувать систему можно только до рекомендованного давления, определенного для данной модели- 7-9 PSI.
Не превышайте назначенного давления.
2. Во избежание резких болей и головокружений, рекомендуется использовать Систему Hercules лежа или в сидячем положении, начиная с 5- 10 минут, 2 раза в день.
3. В первые недели использования системы Hercules Neck возможно небольшое усиление болевых ощущений. По мере постепенного уменьшения интенсивности болевых ощущений, можно увеличить время ношения до 20-30 минут, и использовать систему 2-4 раза в день. Если боль усиливается, необходимо еще раз проконсультироваться с Вашим врачом.
4. Рекомендуется совмещать использование системы с физиотерапией - для ускорения реабилитационного периода.
5. **Запрещено использование системы без разрешения врача, в случае травм позвоночника, или других проблемах, при которых растяжение позвоночника недопустимо. После перенесенной операции на позвоночнике использовать систему не ранее чем через три месяца.**
6. **Не храните систему Hercules Neck рядом с горячими или острыми предметами.**

Показания к применению:

- Грыжа межпозвоночных дисков; • Остеохондроз; • Острая или хроническая боль в шейном отделе, отдающая в затылок, плечо или руку; • Дегенеративно-дистрофические изменения межпозвоночных дисков • Мышечные спазмы.

Противопоказания: прогрессирующий остеопороз и гипертония.

Правила ухода: Стирка только при температуре не выше 30 градусов.

Не выжимать и не сушить на солнце. Хранить в темном месте.

Гарантия 1 год, при условии использования Системы Hercules Neck согласно инструкции.

Гарантия не распространяется также на любые дефекты, связанные с превышением максимально допустимого давления или механическим воздействием (прокол и т.д.).

Производство Южная Корея.

Бесплатное гарантийное обслуживание производится только по адресу:

Тель Авив ул. Бен Цви 84 , 6 этаж, кабинет 654.

Стоимость гарантийного обслуживания на дому- 150 шекелей.